



Obrázky jsou ilustrativní a kryt na kolimátoru se může lišit.

- 1) Odšroubujte postranní kryt žárovky na kolimátoru.

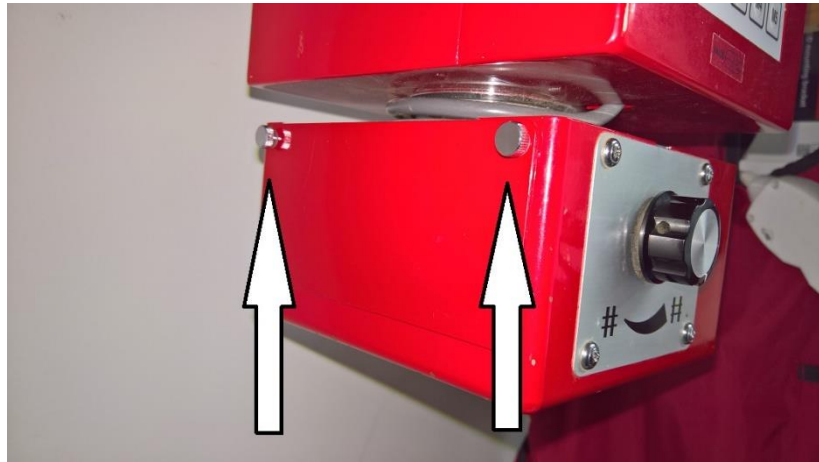

- 2) Odšroubujte kovový kryt žárovky a vyjměte ho.

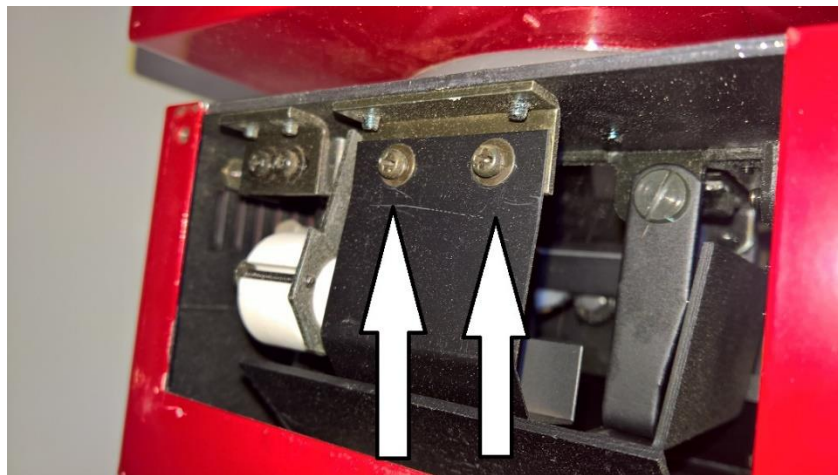

- 3) Vyměňte žárovku ze slotu. POZOR může být zahřátá. Pokračujte opačným postupem s novou žárovíčkou. Dbejte na to, aby byla žárovíčka dostatečně zasunuta ve slotu a nedošlo tak k posunutí kolimačního pole.

V případě problémů, při výměně žárovky u RTG AJEX a Gierth, kontaktuje prosím technika ATOMVET na telefonním čísle **+420 702 011 161**.

ATOMVET.CZ  
Srbská 497  
Liberec 46001  
CZECH REPUBLIC

Michael Hejný  
záruční a pozáruční servis  
email: [technik@atomvet.cz](mailto:technik@atomvet.cz)  
telefon: +420 702 011 161