
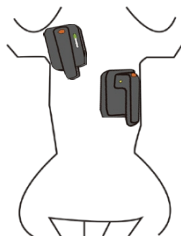


uMED 20 Vet Veterinární defibrilátor/monitor



Stručný návod k použití

Postupy ruční defibrilace

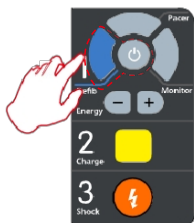


1. Stiskněte tlačítko napájení (🔌) nebo tlačítko režimu **defibrilace**, aby se zařízení zapnulo a přešlo do režimu ruční defibrilace.

2. Naneste vodivý gel na elektrody a připojte externí elektrody ke zvířeti, jak je znázorněno na obrázku.

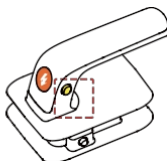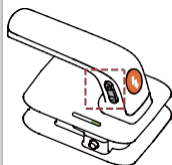

3. Stiskněte tlačítko **Energy** na externích elektrodách nebo na předním panelu.

4. Stiskněte tlačítko **Charge (Nabít)** na externích elektrodách nebo na předním panelu.

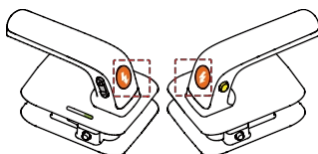

5. Stiskněte současně tlačítka **Shock** na externích elektrodách.

Indikátor stavu ()

Zelená

- ◆ Síťové napájení je připojeno a zařízení funguje správně.
- ◆ Je připojena pouze baterie, zařízení je zapnuté a funguje správně.

Blikající zelená

- ◆ Je připojena pouze baterie, zařízení je vypnuté a funguje správně.

Blikající červená

- ◆ Je připojena pouze síťová zástrčka a jako **stavový indikátor** je nastavena **možnost „Žádná baterie“**.
- ◆ Je připojena pouze baterie a baterie má nízký výkon (symbol baterie ).
- ◆ Automatický test baterie selhal nebo byla zjištěna porucha zařízení.


Vypnuto: síťové napájení a baterie nejsou připojeny.

Údržba

Test směny by měl být prováděn při každé směně nebo alespoň jednou denně. Podrobnosti si vyžádejte ve své instituci nebo v návodu k obsluze. Po provedení testu směny byste měli zařízení vypnout a připojit k síti střídavého proudu a baterii.

Ruční test by měl být prováděn každé tři měsíce nebo když stavový indikátor bliká červeně. Chcete-li provést ruční test, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko napájení nebo libovolné tlačítko režimu, aby se zařízení zapnulo.
2. Stiskněte tlačítko Test Report () na předním panelu.
3. Pokud existuje nějaká chyba, odstraňte ji podle zobrazených pokynů.
4. Vyberte softwarové tlačítko **Manuální test**.
5. Proveďte operace podle zobrazených pokynů, dokud zařízení neoznámí, že ruční test byl úspěšný.

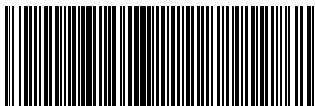

046- 025247- 00 (3. 0)